

新発想!

特許出願中

クスコーの側面孔から子宮マニピュレーターを容易に挿入!

子宮マニピュレーター挿入用 井坂式腔鏡

マニクスコー 375-43

東京医科大学 産科婦人科学分野

特任教授 井坂 恵一 先生 共同開発

使い慣れている  
クスコータイプでできる  
子宮マニピュレーターの  
簡単挿入!

Mサイズ 375-43M

Sサイズ 375-43S



※子宮マニピュレーターは  
付属しません。

この側面孔が  
ポイント!



本器具の側面孔から子宮マニピュレーターを  
挿入することにより、理想的な操作性が得られます。  
また子宮マニピュレーターを腔内に残したまま  
本器具を容易に外すこともできます。



株式会社 ナミキ・メディカルインストゥルメンツ

Namiki Medical Instruments

ご使用方法は裏面をご覧ください。

## ご使用方法

1



本器具を腔に挿入し、単鉤鉗子で子宮腔部を挟鉗後、スケールで子宮腔長を確認します。

2



子宮マニピュレーターを本器具の正面から仮挿入します。

3



いったん子宮マニピュレーターを抜き、本器具を少し斜めにして側面孔から再度子宮マニピュレーターを挿入し、バルーンで留置します。

4




子宮マニピュレーターを腔内に残したまま本器具を外します。

※子宮マニピュレーター、スケール、鉗子は付属しません。

通常のカスコーとしても  
お使いいただけます。

左利きの先生用も  
ご用意しております。

販 売 名	子宮マニピュレーター対応 井坂式腔鏡 マニクスコー
品 番	375-43
材 質	ステンレス
サ イ ズ	Mサイズ 375-43M Sサイズ 375-43S 左利き用Mサイズ 375-H43M 左利き用Sサイズ 375-H43S
薬 機 法 分 類	クラスI 一般医療機器 開孔器
薬機法届出番号	13B3X00115375043

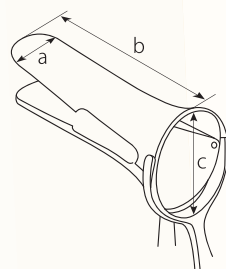

■サイズ表(m/m)

	a	b	c
M	24	103	48
S	20	96	44

特許出願中

製造販売元



Namiki Medical Instruments

株式会社 ナミキ・メディカルインストゥルメンツ

〒132-0035 東京都江戸川区平井7-14-11

TEL.03-3610-0375 FAX.03-3610-3777

[E-mail] info@namiki-mi.co.jp

[URL] http://www.namiki-mi.co.jp

手術用器具開発工房

販売代理店

MIYAKAWA

株式会社 宮川商店

〒130-0011 東京都墨田区石原4-17-7

TEL.03-3621-4015 FAX.03-3621-4016

[E-mail] miyakawa@miyakawa-s.co.jp