



Namiki Medical Instruments

ニッポンのクスクメーカーナミキの
高機能手術器具シリーズ

特許
第6516339号

バリエーション	全15種類			
ブラック	375-38H-	Lサイズ	Mサイズ	Sサイズ
ブラック 結紮糸固定ネジ付き	375-38HN-	Lサイズ	Mサイズ	Sサイズ
シルバー	375-38HC-	Lサイズ	Mサイズ	Sサイズ
シルバー 結紮糸固定ネジ付き	375-38HCN-	Lサイズ	Mサイズ	Sサイズ

円錐切除用



円錐切除用ブラック 375-38H- 円錐切除用ブラック 結紮糸固定ネジ付き 375-38HN- 円錐切除用シルバー 375-38HC-

蒸散用



蒸散用ブラック 375-38-

専用吸引管(別売)



375-38SC


材質	真ちゅう 洋白 ステンレス
表面処理	ブラッククロームメッキ クロームメッキ(いずれも絶縁性なし)
薬機法分類	クラスI 一般医療機器

※吸引装置・チューブ・結紮糸は付属しません

【使用上のご注意】
本製品に絶縁性はありません 電気メス等の併用には感電・火傷などに十分ご注意ください

■サイズ表(m/m)

	a	b	c
円錐切除用 L	31	79	51
円錐切除用 M	28	75	48
円錐切除用 S	25	69	44
蒸散用 L	26	108	50
蒸散用 M	24	99	49
蒸散用 S	21	93	45

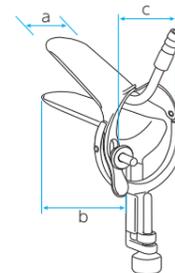

- 国産品
- 動作不良3年間修理無料
- 見本貸出可
- 名入れ無料

❖ 実際に手術でお使いいただけるデモ機をご用意しております ❖

円錐切除・レーザー蒸散の 煙を低減します! 出血にも対応!

375-38 排煙 桜井式腔鏡

慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室
専任講師 岩田 卓 先生 開発ご指導

煙を吸い取る吸引口が付いた腔鏡です
本器と病院様の吸引装置を汎用チューブで
つなぐだけ!



※吸引装置やチューブは付属しません



視界良好

蒸散用ブラック

ご使用可能なデモ機をお貸しいたします お気軽にご依頼ください

製造販売元



ニッポンのクスクメーカー

Namiki Medical Instruments
株式会社 ナミキ・メディカルインストゥルメンツ

〒132-0035 東京都江戸川区平井7-14-11

TEL.03-3610-0375 FAX.03-3610-3777

E-mail info@namiki-mi.co.jp

URL http://www.namiki-mi.co.jp



株式会社 ナミキ・メディカルインストゥルメンツ

円錐切除・レーザー蒸散の煙を 低減します! 出血にも対応!

排煙 桜井式腔鏡 375-38

特許
第6516339号

慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室
専任講師 岩田 卓 先生 開発ご指導

※吸引装置やチューブは付属しません

NEW 術式に応じて威力を発揮する豊富なバリエーション

円錐切除用(標準型)



円錐切除用ブラック

挿入部は桜井式の標準型と同じ **短いタイプ**

電気メスのじゃまにならない **フラットな内側**

電気メスなどの操作の障害にならないよう吸引ポートを挿入部の外側に付けて内側はフラットになりました



円錐切除用ブラック

大きさは3種類 **L・M・S**

表面コーティングは2種類

反射防止のブラック
術野が明るいシルバー



NEW
円錐切除用ブラック
結紮糸固定ネジ付き



NEW
円錐切除用シルバー

ユニークな機能

結紮糸固定ネジ付きも
お選びいただけます

蒸散用(ロング型)



蒸散用ブラック

挿入部はクスコ腔鏡のような **長いタイプ**

どんどん吸い取る **内側の先端までのびる吸引ポート**

多くの煙が発生する蒸散に対応するため吸引ポートは挿入部の内側の先端部分まで延長しました



蒸散用ブラック

大きさは3種類 **L・M・S**

表面コーティングは **反射防止のブラック**

NEW 円錐切除に便利な結紮糸を留めるネジ付きタイプ

子宮動脈下向枝を結紮した結紮糸を引っかけて固定するためのネジがあります
手術の精度と効率が格段にアップします



結紮糸を本器の軸に巻き付けてネジで固定します
※吸引装置・チューブ・結紮糸は付属しません



円錐切除用ブラック
結紮糸固定ネジ付き

NEW 出血時に活躍する排煙・吸引兼用の専用吸引管(別売り)



専用吸引管

使用方法

- 1 通常は専用吸引管に汎用チューブを接続して本器のチューブ接続口に差し込んで煙を吸いこみます【画像1】
- 2 出血時は専用吸引管を本器のチューブ接続口から抜いてチューブ接続口に再度差し込んで排煙を継続します
- 3 その後専用吸引管をチューブ接続口に再度差し込んで排煙を継続します



通常の排煙

蒸散用ブラック

【画像1】



出血時の吸引

蒸散用ブラック

【画像2】

※吸引装置やチューブは付属しません