

バリエーション	全15種類			
ブラック	375-38H-	L サイズ	M サイズ	S サイズ
ブラック 結紮糸固定ネジ付き	375-38HN-	L サイズ	M サイズ	S サイズ
シルバー	375-38HC-	L サイズ	M サイズ	S サイズ
シルバー 結紮糸固定ネジ付き	375-38HCN-	L サイズ	M サイズ	S サイズ

円錐切除用



円錐切除用ブラック 375-38H- 円錐切除用ブラック 結紮糸固定ネジ付き 375-38HN- 円錐切除用シルバー 375-38HC-

蒸散用



蒸散用ブラック 375-38-

専用吸引管 (別売)



375-38SC

ご使用方法

- 1 本器のチューブ接続部に医療用汎用チューブを接続
(専用吸引管を使用する場合は医療用汎用チューブを専用吸引管に接続して、その後に専用吸引管の先端を本器のチューブ接続部に差し込む)
- 2 医療用汎用チューブのもう一方をご施設様の吸引装置に接続して作動させる
- 3 本器のブレード部を腔に挿入
- 4 施術開始


【ご注意】本製品に絶縁性はありません。レーザー機器や電気メス等の併用時には感電・火傷などに十分ご注意ください

※医療用汎用チューブは本器のチューブ接続部のサイズに合うものをお使いください

■サイズ表(m/m)

材 質	真ちゅう	洋白	ステンレス
表面処理	ブラッククロームメッキ	クロームメッキ (いずれも絶縁性なし)	
薬機法	クラスI 一般医療機器		
	許可番号 13B3X00115375038		

	a	b	c
円錐切除用 L	31	79	51
円錐切除用 M	28	75	48
円錐切除用 S	25	69	44
蒸散用 L	26	108	50
蒸散用 M	24	99	49
蒸散用 S	21	93	45

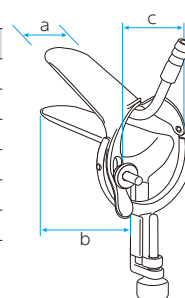

国産品 動作不良3年間修理無料 見本貸出可 名入れ無料

実際に手術でお使いいただけるデモ機をご用意しております

製造販売元



ニッポンのクスメーカー

Namiki Medical Instruments

株式会社 ナミキ・メディカルインストゥルメンツ

〒132-0035 東京都江戸川区平井7-14-11

TEL.03-3610-0375 FAX.03-3610-3777

E-mail info@namiki-mi.co.jp

URL http://www.namiki-mi.co.jp



Namiki Medical Instruments

ニッポンのクスメーカーナミキの
高機能手術器具シリーズ

特許 第6516339号

円錐切除術・蒸散術の煙を瞬時に吸引

煙のないクリアな視界の確保と
サージカルスモーク対策※1 出血にも対応

375-38

慶應義塾大学 医学部 産婦人科学教室
准教授 岩田 卓 先生 開発ご指導

※1 サージカルスモーク対策には専門メーカーの吸煙装置 (フィルター付き) が必要です
※2 画像はイメージです。チューブや吸引装置は付属しません

YouTube臨床動画
「煙のない蒸散術」



実際にご使用可能なデモ機をご用意しております



Namiki Medical Instruments

株式会社 ナミキ・メディカルインストゥルメンツ

全国の大学病院様・地域中核病院様のご採用実績多数

「この腔鏡がない 円錐切除術・蒸散術にはもう戻れない」

とのお声をいただいております

排煙 桜井式腔鏡 375-38

特許
第6516339号

術式に対応した豊富なバリエーションとユニークなオプション

円錐切除用（標準型）



円錐切除用ブラック
375-38H

挿入部は桜井式の標準型と同じ
短いタイプ

レーザー機器・電気メスの
じゃまにならない

フラットな内側

表面コーティングは2種類

**レーザー機器の反射を防ぐブラック
術野が明るいシルバー**

ユニークな機能

結紮糸固定ネジ付き
お選びいただけます

吸引口が内側に
出っ張らない



円錐切除用シルバー
375-38HC

円錐切除に便利な結紮糸を留めるネジ付きタイプ

子宮動脈下行枝を結紮した結紮糸を引っかけて
固定するためのネジがあります




※吸引装置・チューブ・結紮糸は付属しません



円錐切除用ブラック
結紮糸固定ネジ付き
345-38HN

開発者

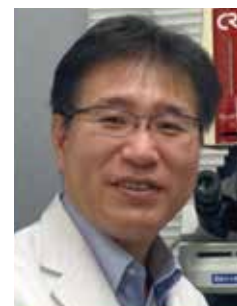

慶應義塾大学 医学部 産婦人科学教室
准教授 岩田 卓 先生

レーザー手術で発生するサージカルスモークの問題を解決するため排煙機能を備えた腔鏡を開発いたしました。蒸散術用はレーザー光を遮ることなく排煙が可能となるよう設計しており、円錐切除術用は子宮動脈下行枝の結紮糸を確実に固定できるネジを備え、腔鏡の安定性を高めるとともに術者の操作性向上も図っています（左下）。専用の排煙管は出血時に吸引管として機能するよう設計し、血液吸引時に視野が遮られないように適度な角度をつけ、また先端部が細くなっているため出血点を隠すことのないように形状を最適化しています（右下）。これらの機材が安全な手術にお役立ていただけるものと自負しております。

蒸散用（ロング型）



蒸散用ブラック
375-38

挿入部はクスコ腔鏡のような
長いタイプ

**多くの煙が発生する蒸散術に対応するため
吸引口を内側に設置**

レーザー光を
遮らない設計



表面コーティングは

レーザー機器の反射を防ぐブラック

※写真はイメージです



専用吸引管 375-38SC

**出血時に活躍する排煙・吸引兼用の
専用吸引管（別売り）**

使用方法

1

通常は専用吸引管に汎用チューブを接続して本器のチューブ接続口に差し込んで煙を吸いこみます【画像1】

2

出血時は専用吸引管を本器のチューブ接続口から抜いて血液を吸引します【画像2】

3

その後専用吸引管をチューブ接続口に再度差し込んで排煙を継続します

通常の排煙



蒸散用ブラック

【画像1】

出血時の吸引



蒸散用ブラック

【画像2】

※吸引装置やチューブは付属しません